

HALLUX VALGUS DOPPELSCHUTZ-KORREKTURBANDAGE

INDIKATIONEN

Mit dieser Korrekturschiene ist es möglich, die Entwicklung des Hallux valgus zu korrigieren und einzuschränken und gleichzeitig Gelenk- und Fußsohlenschmerzen zu lindern.

KONTRAINDIKATIONEN


- Seitlich nicht mehr zu bewegender großer Zeh.
- Nicht auf einer offenen Wunde anwenden.
- Personen, die an Arterienentzündungen, Diabetes, Polyneuritis, Neuropathien der unteren Extremitäten, Veneninsuffizienz oder schweren Ödemen leiden: Schiene niemals auf einer offenen Wunde anwenden. Der Fuß muss während der Anwendung beobachtet werden. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihren Podologen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Falls der große Zeh seitlich nicht mehr beweglich ist, darf diese Bandage nicht verwendet werden.
- Bandage vorzugsweise tagsüber tragen, da die Wirksamkeit durch Gehen unterstützt wird.
- In zwei Versionen erhältlich: für den linken und für den rechten Fuß. Die schwarz bedruckte Seite der Bandage ist die Außenseite, d. h. sie muss in Kontakt mit der Schuhsohle sein.

– ANLEGEN:

- Vorfuß in das Kompressionsband schieben.
- Kappe auf den großen Zeh setzen.
- Gummiband um den zweiten oder dritten Zeh legen (je nach Zentrierung des Fußsohlenschutzes).
- Epithelium™-Schutzpad (a) hinter dem Überbein (b) platzieren. (Siehe Abbildung 1)

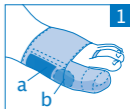

– EINSTELLUNG:

- Am ersten Tag nicht versuchen, den großen Zeh geradezubiegen.
- Den großen Zeh 10 Tage lang, allmählich geradebiegen. Dazu das Kompressionsband nach hinten ziehen. (Siehe Abbildung 2)



Um eine optimale Wirksamkeit zu erzielen, muss die Bandage täglich getragen werden.

PFLEGE

- Vor der ersten Anwendung waschen. In der Waschmaschine bei 30°C in dem mitgelieferten Wäschenetz oder von Hand waschen (nicht reiben).
- An der Luft trocknen lassen. Nicht bügeln.

ZUSAMMENSETZUNG: 56% Polyamid/Elasthan, 44% Silikon.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm, welche Produkte mit direktem Hautkontakt betreffen, unterzogen. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

Im Fall unsachgemäßer Anwendung und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise kann MILLET Innovation keine Haftung übernehmen. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2012.



Maschinenwäsche
30°C.



Nicht bügeln
(kein Dampf).



Nicht chemisch
reinigen.



Bleichen mit Chlor
nicht erlaubt.



Nicht
maschinentrocknen.



LOT Siehe Verpackung.