

FLEXIBLE KORREKTURBANDAGE HALLUX VALGUS

INDIKATION

Korrektur und Verlangsamung des Fortschreitens eines Hallux valgus und gleichzeitige Linderung der Gelenkschmerzen.

GEGENANZEIGEN


- Unbeweglicher großer Zeh.
- Nicht über einer Hautverletzung tragen.
- Personen, die an Arterienentzündungen, Diabetes, Polyneuritis, Neuropathien der unteren Extremitäten oder Veneninsuffizienz leiden: Das Produkt darf niemals auf einer offenen Wunde getragen werden. Der Fuß muss während der Anwendung beobachtet werden. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihren Podologen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- **Vergewissern Sie sich zunächst, dass sich der große Zeh noch seitlich bewegen lässt. Wenn dies nicht der Fall ist, darf diese Korrekturbandage nicht verwendet werden.**
- **Dieses Produkt nicht während der Nacht verwenden.**
- **Die Korrekturbandage kann gleichermaßen am linken oder rechten Fuß getragen werden.**
- **Vor der ersten Anwendung waschen.**

– ANLEGEN :

- Vorderfuß in das Band schieben.
- Anschließend die Kappe über den grossen Zeh ziehen.
- EPITHELIUM-Polster™ (a) hinter dem Hallux platzieren (b). **(Siehe Abbildung 1)**

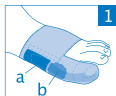

– EINSTELLUNG:

- **Am ersten Tag nicht versuchen, den großen Zeh geradezubiegen.**
- Den großen Zeh 10 Tage lang **allmählich richten**. Dazu die Korrekturbandage nach hinten ziehen. **(Siehe Abbildung 2)**



Um eine optimale Wirksamkeit zu erzielen, muss die Korrekturbandage täglich getragen werden.

REINIGUNG

- In der Waschmaschine bei 30°C in dem mitgelieferten Wäschenetz oder von Hand waschen (nicht reiben).
- An der Luft trocknen lassen. Nicht bügeln.

ZUSAMMENSETZUNG: 58% Silikon, 42% Polyamid/Elasthan.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm, welche Produkte mit direktem Hautkontakt betreffen, unterzogen. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

Im Fall unsachgemäßer Anwendung und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise kann MILLET Innovation keine Haftung übernehmen. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2011.



Maschinenwäsche
30°C.



Nicht bügeln
(kein Dampf).



Nicht chemisch
reinigen.



Bleichen mit Chlor
nicht erlaubt.



Nicht
maschinentrocknen.



LOT Siehe Verpackung.