

## BLASENSCHUTZ EPITHELIUMTACT 01

### FUNKTIONALITÄTEN:

Die EPITHELIUMTACT 01 Blasen-Schutzpflaster bestehen aus einem 1 mm dünnen selbstklebenden Silikongel, das den Eigenschaften der menschlichen Haut sehr ähnelt. Vor dem Sport auf die empfindlichen Stellen des Fußes aufgetragen, verteilen die Schutzpflaster den Druck und nehmen Reibungen auf, indem die Energie im Gel verteilt wird, und verhindern dadurch die Blasenbildung. Sie tragen sich angenehm auf der Haut und das Entfernen ist selbst an behaarten Stellen schmerzfrei.

### VERWENDUNGSTIPPS:

Diese Pflaster sind präventiv zu verwenden. Sie sind ebenfalls perfekt geeignet, wenn sich die Blase bereits gebildet hat, aber noch nicht geplatzt ist.

Die Pflaster müssen auf trockener und sauberer Haut verwendet werden.

- Ein Schutzpflaster aus der grauen Kunststoffhülle herausnehmen.
- Den Schutzfilm über der klebenden Fläche sorgfältig abziehen.
- Die klebende Fläche auf die Haut auftragen. Darauf achten, dass die zu schützende Zone gut bedeckt ist.
- Für perfekte Haftung das Pflaster leicht andrücken.
- Für einwandfreien Halt das Pflaster mit dem Fixiervlies-Pflaster bedecken (das Pflaster zentral positionieren und 2 cm Klebeband rund herum frei lassen).
- Nach der Verwendung das Fixiervlies von der Haut abziehen und das Pflaster sanft ablösen.
- Das Pflaster auf dem hierfür vorgesehenen Papieretui kleben und in der grauen Kunststoffhülle bis zur nächsten Verwendung aufbewahren.

### PFLGE:

Die Pflaster können durchschnittlich 4 bis 5 Mal mit Wasser und Seife gewaschen werden und behalten dabei ihre vollständige Klebeeigenschaften. Nicht reiben und an der Luft trocknen lassen.

### GEGENANZEIGE:

- Das Produkt wurde allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm, welche Produkte mit direktem Hautkontakt betreffen, unterzogen. Sollte trotzdem eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.
- Nicht über einer offenen Wunde verwenden.
- Für Personen mit Arthritis, Diabetes, Polyneuritis, Neuropathie der unteren Extremitäten oder venösen Ulzera: Dieses Produkt keinesfalls auf einer Wunde, einer Hautverletzung verwenden, den Fuß während der Verwendung beobachten und gegebenenfalls Ihren Arzt oder Fußpfleger um Rat fragen.

### ZUSAMMENSETZUNG:

- SCHUTZPFLASTER: 84% Silikon, 16% Polyamid/Elasthan
- FIXIERVLIES-PFLASTER: 100% biokompatibel

MILLET Innovation übernimmt keine Haftung im Fall von unsachgemäßer Verwendung entgegen den Empfehlungen des Herstellers.



Von Hand waschbar.



Nicht bügeln (kein Dampf).



Nicht chemisch reinigen.



Bleichen mit Chlor nicht erlaubt.



Nicht trommel-trocknen.

LOSNUMMER: siehe Verpackung

Protection en silicone  
EPITHELIUMTACT  
auto-adhésive  
EPITHELIUMTACT  
silicone protector  
self-adhesive



Adhésif de maintien  
tenue extrême  
Holding adhesive  
extreme strength

RÉPARTITION DES PRESSIONS ET DES FROTTEMENTS  
DISTRIBUTION OF PRESSURE AND FRICTION

DÉCOUVREZ LA GAMME EPITACT® SPORT:  
DISCOVER THE EPITACT® SPORT RANGE:



Produit issu de la recherche MILLET Innovation.  
Product designed by MILLET Innovation R&D.

[www.epitactsport.com](http://www.epitactsport.com)

# PROTECTIONS ANTI-AMPOULES EPITHELIUMTACT 01

BLISTER PROTECTORS / BLASENSCHUTZ / PROTEZIONI ANTI-VESCICHE / PROTEÇÃO ANTI BOLHAS / BESCHERMERS TEGEN BLAREN / PROTECCIONES ANTIAMPOLLAS / BESKYTTELSER MOD VABLER / SKAVSÄRSSKYDD / RAKKOSUOJAT / GNAGSÄRPLASTER / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΝ



19373-B • 03/2015