





Ecarteur
Separator
Spreizer
Divaricatore
Distensor
Afstandhouder

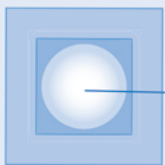

Pastille en silicone
Silicone pad
Silikonscheibe
Plastrina in silicone
Pastilha de silicone
Kussentje in silicone

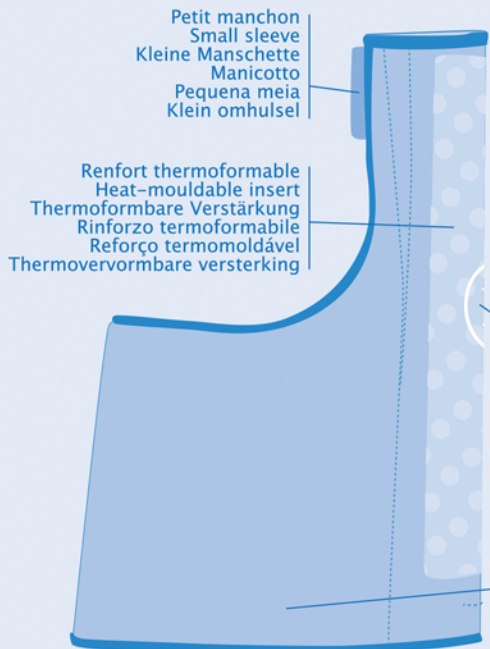

Petit manchon
Small sleeve
Kleine Manschette
Manicotto
Pequena meia
Klein omhulsel

Renfort thermoformable
Heat-mouldable insert
Thermoformbare Verstärkung
Rinforzo termofornabile
Reforço termomoldável
Thermovormbare versterking

Cible blanche
White target
Weiße Marke
Bersaglio bianco
Guia branca
Witte marking

Grand bracelet
Wide wrap
Großes Band
Cinturino grande
Cinta grande
Grote band

STARRE KORREKTURBANDAGE

INDIKATIONEN

Das tägliche Tragen der starren Korrekturbandage EPITACT® unterstützt die Korrektur der Deformierung und hemmt die Entwicklung des Ballenzeus "Hallux valgus". Sie trägt zur Minderung der nächtlichen Gelenkschmerzen bei und befreit von Kontaktschmerzen.

KONTRAINDIKATIONEN

- Seitlich unbeweglicher großer Zeh.
- Das Produkt nicht tagsüber verwenden.
- Nicht über einer Hautverletzung tragen.
- Nicht über einer Hautverletzung tragen.
- Personen mit Arteriitis, Diabetes, Polyneuritis, Neuropathie der unteren Extremitäten oder Geschwüren sollten dieses Produkt nicht verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Überprüfen Sie vorab, dass sich der große Zeh noch seitlich bewegen lässt. Sollte dies nicht der Fall sein, die Schiene bitte nicht verwenden.
- Die Korrekturbandage kann sowohl am rechten als auch am linken Fuß getragen werden.

– THERMOFORM-VORGANG:

Bitte die mitgelieferte Thermoform-Anleitung befolgen. Die starre Korrekturbandage ist mehrmals thermoformierbar. Falls erforderlich wenden Sie sich bitte an einen Podologen.

– ANLEGEN:

- Den Vorderfuß in das Band einführen.
- Dann die kleine Manschette rund um den Zehen ziehen.
- Überprüfen, dass die weiße Marke auf Höhe Ihres "Ballens" positioniert ist (siehe Schema in der mitgelieferten Thermoform-Anleitung).

– VERWENDUNGSBEDINGUNGEN:

- Bei den ersten 3 Anwendungen sollte die Korrekturschiene nicht länger als 2 Stunden getragen werden.
- Bei den folgenden Anwendungen die Korrekturbandage die ganze Nacht über tragen.

Bei den ersten Anwendungen können Gelenkschmerzen auftreten. Wenn diese Schmerzen länger als 7 Nächte andauern, wenden Sie sich bitte an Ihren Podologen.

- Sofern nach einem Monat Tragen keine Schmerzen aufgetreten sind kann ein 2. Thermoformierungs-Vorgang durchgeführt werden, um die Korrektur zu verstärken (siehe mitgelieferte Thermoform-Anleitung). Die gewünschte Korrektur erfolgt dann ohne Spreizer durch seitliches Ziehen am großen Zehen (siehe Schema rechts).



PFLEGE

- In der Waschmaschine bei 30°C im mitgelieferten Waschnetz oder von Hand waschen (ohne Schrubben).
- An der Luft trocknen lassen. Nicht bügeln. Keinen hohen Temperaturen aussetzen (>50°C).

ZUSAMMENSETZUNG: 52% thermoformbarer Kunststoff, 28% Polyamid/Elasthan, 20% Silikon.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm, welche Produkte mit direktem Hautkontakt betreffen, unterzogen. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

Im Fall unsachgemäßer Anwendung und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise kann MILLET Innovation keine Haftung übernehmen. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2015.

NOTICE D'UTILISATION

DIRECTIONS FOR USE / GEBRAUCHS- ANWEISUNG / FOGLIETTO ILLUSTRATIVO / FOLHETO INFORMATIVO DE UTILIZAÇÃO / GEBRUIKSAANWIJZING



Ref.: 19377-D_04/2019

