

DEUTSCH



ERGOstrap™ SPORT EPITHELIUMFLEX®

INDIKATIONEN:

Leichte bis mittelschwere externe Verstauchungen, chronische Instabilität des Knöchels, Wiederaufnahme einer sportlichen Aktivität.

GEGENANZEIGEN:

Nicht anwenden bei Arterienentzündungen, Diabetes, Polyneuritis oder Neuropathie in den unteren Gliedmaßen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

ERGOstrap™ SPORT nicht direkt auf der Haut anlegen. ERGOstrap™ SPORT muss über Socken mit ausreichend hohem Bund getragen werden, um Sie beim Tragen nicht zu behindern. Nicht in der Ruhestellung tragen (nur während der Ausübung Ihres Sports anwenden). Wenn Sie Kompressionsmanschetten an den Unterschenkeln tragen, diese unter ERGOstrap™ SPORT anlegen. Nicht in Verbindung mit Stützstrümpfen anwenden.

MERKMALE:

Dank der kombinierten Wirkung von thermoformbaren Verstärkungen im Bereich der Knöchel und des patentierten Strappings EPITHELIUMFLEX® unterstützt und stabilisiert ERGOstrap™ SPORT den Knöchel, ohne die Beweglichkeit einzuschränken.

ERGONOMIE :

ERGOstrap™ SPORT ist geballte Technologie mit einem Gewicht von weniger als 120 g, die speziell für den Sport entwickelt wurde. Die komfortable Bandage passt sich perfekt an Ihren Körper an. Sie ist extrafein (keine Verdickung unter der Ferse) und kann in jedem Schuh getragen werden. Sie ERGOstrap™ SPORT ist bei der Ausübung Ihres Sports kaum spürbar.

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Thermoformierung: Lesen Sie die beigegefügte Beschreibung durch oder sehen sich das Video unter www.ergostrapsport.com an. ERGOstrap™ Sport kann bei Bedarf mehrmals sich geformt werden.
- Anlegen der Bandage: Sehen sich das Video unter www.ergostrapsport.com an.



PFLEGE:

Bei 30°C in der Waschmaschine oder von Hand waschen, ohne zu reiben. An der Luft trocknen lassen. Nicht bügeln. Keiner übermäßigen Hitze (> 50 °C) aussetzen.

ZUSAMMENSETZUNG: 50 % Polyamid/Elasthan-Gewebe, 32 % thermoformierbarer Kunststoff, 18 % Silikon.

Die Biokompatibilität der Materialien wird nach der Norm ISO 10993-1 bewertet. Sollte sich ein unvorhergesehener Zwischenfall ereignen, die Anwendung sofort unterbrechen und die Fa. MILLET Innovation benachrichtigen.

MILLET Innovation haftet nicht im Fall einer unsachgemäßen Anwendung und Nichtbeachtung der Hinweise des Herstellers. Französisch ist die Referenzsprache. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2017.

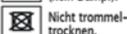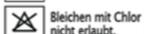

TECHNOLOGIE BREVETÉE PATENTED TECHNOLOGY



Renforts thermoformables
Heat-mouldable supports

Strapping en silicone
EPITHELIUMFLEX®
EPITHELIUMFLEX®
silicone strapping

CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE POUR UN MAINTIEN OPTIMAL
A TECHNOLOGICAL MARVEL OFFERING OPTIMUM SUPPORT

19531 - B • 09/2017

DÉCOUVREZ
LA GAMME EPITACT® SPORT
DISCOVER
THE EPITACT® SPORT RANGE

www.epitactsport.com

ERGOstrap™ SPORT



MILLET
INNOVATION

Produit issu de la recherche MILLET Innovation.
Product designed by MILLET Innovation R&D.

MILLET Innovation - ZA Champgrand
BP64 - 26270 Loriol/Drôme - FRANCE

contact@epitact.com
www.epitactsport.com