

RUHEBANDAGE DAUMEN

IMMOBILISERT UND ENTLASTET DEN DAUMEN



**ERGONOMISCHE
SCHNITTFORM**
> Optimale
Anpassung an
die Morphologie.

**WEICHER UND
DÜNNER STOFF**
> Komfort und
Evakuierung
von Schweiß.



ANATOMISCHE VERSTÄRKUNGEN
> Immobilisierung
des Daumens in der Ruhestellung.

**BAND MIT
KLETTVERSCHLUSS**
> Anpassen der
Bandage um
das Handgelenk.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Nachts oder in allen Situationen, in denen Sie den Daumen nicht benutzen, hilft das regelmässige Tragen der EPITACT® Ruhebandage Gelenkschmerzen am Ansatz des Daumens zu lindern und trägt dazu bei, das Voranschreiten der Rhizarthrose zu verringern.

GEGENANZEIGEN:

Nicht auf einer Hautverletzung tragen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Im Falle eines starken Ödems: beobachten Sie die Hand während des Tragens der Bandage. Ziehen Sie sie aus, wenn die Spannung zu stark ist und die Durchblutung hemmt. Bestehen Zweifel, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Keine Creme auftragen vor dem Anziehen der Bandage.

Nicht neben einer Flamme oder einem glühenden Gegenstand benutzen.

EIGENSCHAFTEN:

Die EPITACT® Ruhebandage immobilisiert den Daumen im Ruhezustand, indem die Kommissur zwischen dem Zeigefinger und dem Daumen geöffnet wird. Die Ausrichtung der Knochen verringert den Druck, der auf das Daumensattelgelenk ausgeübt wird und lindert somit den Schmerz.

ERGONOMIE:

Dank der vorgeformten Verstärkungen, die sich perfekt an die Form Ihrer Hand anpassen, gibt die Ruhebandage Ihnen einen optimalen Komfort. Durch ihre Leichtigkeit und die Dünne, vergessen Sie sie beim Tragen.

TIPP:

Als Ergänzung zur Ruhebandage Daumen empfehlen wir Ihnen, die flexible EPITACT® Daumenbandage zu tragen – in allen Situationen, in denen Sie Ihre Hand benutzen möchten.

PFLEGE:

Handwäsche, mit einer sanften Seife ohne Wasch- oder Bleichmittel. Gut auswaschen. Auswringen mit etwas Druck. Zum Trocknen nicht einer direkten Wärmequelle aussetzen (Heizung, Sonnenstrahlen). Keinen Fleckenentferner benutzen.

ZUSAMMENSETZUNG: 57% Textil (Polyamid, Elasthan, Polyurethan), 43% thermoformierbares Plastik.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm unterbreitet. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

Millet Innovation übernimmt keine Haftung im Fall von unsachgemäßer Verwendung entgegen den Empfehlungen des Herstellers. Die massgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2017.



Handwäsche.



Nicht bügeln.



Nicht chemisch reinigen.



Bleichen nicht erlauben.



Nicht im Trockner trocknen.



Siehe Verpackung.

Produkt aus der MILLET Innovation Forschung.

MILLET Innovation - Z.A. Champgrand
26270 Loriol/Drôme - FRANKREICH

MILLET
INNOVATION

www.uhlmann.ch

FLEXIBLE DAUMENBANDAGE aus EPITHELIUMFLEX®

INDIKATION

Zur Linderung von Gelenkschmerzen am Daumenansatz (Rhizarthrose), indem passive Mikrobewegungen eingeschränkt werden.

GEGENANZEIGEN

- Nicht über einer Hautverletzung tragen.
- Im Fall eines schweren Ödems: die Hand während der Verwendung beobachten. Die Bandage abnehmen, wenn sie zu eng wird und die Durchblutung behindert. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Vor der ersten Anwendung waschen.
- Dieses Produkt wird tagsüber getragen.
- Erhältlich in zwei Versionen: für die rechte und linke Hand (die Naht muss sich an der Handinnenseite befinden).
- Nicht in der Nähe einer Flamme oder eines glühenden Gegenstandes verwenden.

EIGENSCHAFTEN

Die EPITACT® Flexible Daumenbandage ermöglicht es, eine ganzheitliche Funktionalität der Hand über den gesamten Tag zu erhalten. Sie ergänzt starre Schienen, die besser für den nächtlichen Gebrauch geeignet sind.

ANZIEHEN DER BANDAGE

Die Bandage über die Hand ziehen und den Daumen in die dafür vorgesehene Daumenöffnung schieben. Die Naht muss sich an der Handinnenseite befinden. Für optimalen Komfort kann die Position der Bandage angepasst werden, indem die Naht leicht nach links oder rechts verschoben wird.



PFLEGE

- Maschinenwäsche 30°C.
- Kein Fleckenmittel verwenden (Azeton, Lösemittel, usw.).
- An der Luft trocknen lassen. Nicht bügeln.

ZUSAMMENSETZUNG: 86% Polyamid/Elasthan, 14% Silikon.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm, welche Produkte mit direktem Hautkontakt betreffen, unterzogen. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

Im Fall unsachgemäßer Anwendung und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise kann MILLET Innovation keine Haftung übernehmen. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2013.



Maschinenwäsche
30°C.



Nicht bügeln
(kein Dampf).



Nicht chemisch
reinigen.



Bleichen mit Chlor
nicht erlaubt.



Nicht
maschinentrocknen.



LOT Siehe Verpackung.