

## FLEXIBLE AKTIVITÄTS-HANDGELENKBANDAGE

### CARP' ACTIV™

#### UNTERSTÜTZT UND BEGLEITET DIE BEWEGUNG



#### ANWENDUNGSGEBIETE:

Das Tragen der flexiblen Aktivitäts-Handgelenkbandage CARP'ACTIV™ wird bei Karpaltunnelsyndrom, Erkrankungen des Bewegungsapparats oder Sehnenscheidenentzündungen am Handgelenk während Ihrer täglichen Aktivitäten empfohlen.

#### GEGENANZEIGEN:

Die Bandage darf nicht direkt mit einer Hautverletzung in Berührung kommen.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN:

Nicht empfohlen bei längerem Arbeiten mit der Tastatur. Nicht in der Nähe einer Flamme oder eines glühenden Gegenstands verwenden.

#### EIGENSCHAFTEN:

Die Bandage begleitet die Bewegungen Ihres Handgelenks, wobei Sie die Finger frei bewegen können. CARP'ACTIV™ schränkt den Bewegungsumfang des Handgelenks ein und verhindert abrupte Bewegungen

#### ERGONOMIE:

Dank ihrem technischen Gewebe und ihrem speziellen Design, das sich der Wölbung der Hand anpasst, sorgt die Bandage für Sicherheit und optimalen Komfort.

#### LEBENSDAUER:

Die Bandage lässt sich in dem mitgelieferten WäscheNetz in der Maschine waschen und verfügt daher über eine lange Lebensdauer (mehrere Monate).

#### ZUSAMMENSETZUNG: 100 % Polyamid-/Elasthangelgewebe.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm unterbreitet. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen. Millet Innovation übernimmt keine Haftung im Fall von unsachgemäßer Verwendung entgegen den Empfehlungen des Herstellers. Die massgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2018.



Produkt aus der MILLET Innovation Forschung.

MILLET Innovation - Z.A. Champgrand  
26270 Lorio/Drôme - FRANKREICH

[www.epitact.ch](http://www.epitact.ch)

MILLET  
INNOVATION



## RUHEBANDAGE DAUMEN

### IMMOBILISERT UND ENTLASTET DEN DAUMEN



**ERGONOMISCHE  
SCHNITTFORM**  
> Optimale  
Anpassung an  
die Morphologie.

**WEICHER UND  
DÜNNER STOFF**  
> Komfort und  
Evakuierung  
von Schweiß.



**ANATOMISCHE VERSTÄRKUNGEN**  
> Immobilisierung  
des Daumens in der Ruhestellung.

**BAND MIT  
KLETTVERSCHLUSS**  
> Anpassen der  
Bandage um  
das Handgelenk.

#### ANWENDUNGSGEBIETE:

Nachts oder in allen Situationen, in denen Sie den Daumen nicht benutzen, hilft das regelmässige Tragen der EPITACT® Ruhebandage Gelenkschmerzen am Ansatz des Daumens zu lindern und trägt dazu bei, das Voranschreiten der Rhizarthrose zu verringern.

#### GEGENANZEIGEN:

Nicht auf einer Hautverletzung tragen.

#### SICHERHEITSHINWEISE:

Im Falle eines starken Ödems: beobachten Sie die Hand während des Tragens der Bandage. Ziehen Sie sie aus, wenn die Spannung zu stark ist und die Durchblutung hemmt. Bestehen Zweifel, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Keine Creme auftragen vor dem Anziehen der Bandage.

Nicht neben einer Flamme oder einem glühenden Gegenstand benutzen.

#### EIGENSCHAFTEN:

Die EPITACT® Ruhebandage immobilisiert den Daumen im Ruhezustand, indem die Kommissur zwischen dem Zeigefinger und dem Daumen geöffnet wird. Die Ausrichtung der Knochen verringert den Druck, der auf das Daumensattelgelenk ausgeübt wird und lindert somit den Schmerz.

#### ERGONOMIE:

Dank der vorgeformten Verstärkungen, die sich perfekt an die Form Ihrer Hand anpassen, gibt die Ruhebandage Ihnen einen optimalen Komfort. Durch ihre Leichtigkeit und die Dünne, vergessen Sie sie beim Tragen.

#### TIPP:

Als Ergänzung zur Ruhebandage Daumen empfehlen wir Ihnen, die flexible EPITACT® Daumenbandage zu tragen – in allen Situationen, in denen Sie Ihre Hand benutzen möchten.

#### PFLEGE:

Handwäsche, mit einer sanften Seife ohne Wasch- oder Bleichmittel. Gut auswaschen. Auswringen mit etwas Druck. Zum Trocknen nicht einer direkten Wärmequelle aussetzen (Heizung, Sonnenstrahlen). Keinen Fleckenentferner benutzen.

**ZUSAMMENSETZUNG:** 57% Textil (Polyamid, Elasthan, Polyurethan), 43% thermoformierbares Plastik.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm unterbreitet. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen.

Millet Innovation übernimmt keine Haftung im Fall von unsachgemäßer Verwendung entgegen den Empfehlungen des Herstellers. Die massgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2017.




Handwäsche.



Nicht bügeln.



Nicht chemisch  
reinigen.

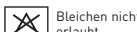

Bleichen nicht  
erlaubt.



Nicht im  
Trockner trocknen.



LOT Siehe Verpackung.

Produkt aus der MILLET Innovation Forschung.



MILLET Innovation - Z.A. Champgrand  
26270 Loriol/Drôme - FRANKREICH

MILLET  
INNOVATION

www.uhlmann.ch