

STARRE RUHEBANDAGE FÜR HANDGELENK UND DAUMEN QUERV'IMMO™



IMMOBILISIERUNG UND ENTLASTUNG FÜR DAUMEN UND HANDGELENK



ANWEISUNGEN:

Während der Nacht bzw. bei allen Gelegenheiten der Stilllegung der Hand wird das regelmäßige Tragen der immobilisierenden Orthese QUERV'IMMO™ bei Beschwerden verbunden mit De-Quervain-Sehnscheidenentzündung und sonstigen Entzündungen sowie Erkrankungen des Muskel- und Knochenapparats am Daumensattel- und Handgelenk empfohlen.

GEGENANZEIGE:

Nicht auf einer Hautverletzung tragen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Dieses Medizinprodukt unterliegt den gesundheitlichen Vorschriften und trägt die EC-Kennzeichnung. Holen Sie im Zweifelsfall fachliche Beratung von Ihrem Arzt oder Apotheker oder von sonstigen medizinischen Fachkräften.

EIGENSCHAFTEN:

Die flexible Handgelenkorthese begrenzt mögliche gefährliche Fehlbewegungen des Handgelenks indem der Daumen in seiner natürlichen Ruheposition gehalten wird während die komplette Beweglichkeit der Hand erhalten bleibt. Die bohnenförmigen Silikonkeilchen schützen den Daumensattelgelenk vor Überdruckrisiken.

BEDIENBARKEIT:

Das feine technische Spezialgewebe und das spezifische morphologische Design nah der Handmorphologie unterstützen die Position des Handgelenks und garantieren einen optimalen Tragekomfort. Dank der wellenförmigen Überlappung des Gewebes am Handgelenk ist das Aufsetzen leicht gemacht. QUERV'IMMO™ ist für den alltäglichen praktischen Gebrauch ohne Klettverschluss konzipiert worden.

PRODUKTLEBENSDAUER:

Nur Handwäsche mit lauwarmem Wasser 30°C und Anwendung einer milden Seife. Kein Waschmittel, kein Bleichmittel, keinen Fleckentferner anwenden. Durchgängig spülen und abtupfen. Nicht vor direkter Hitze trocknen: weder vor der Heizung noch vor direkter Sonnenstrahlung.

GEWEBEKONSTRUKTION: 52% Spezialgewebe (Polyamid, Elasthan, Polyurethan), 46% thermoplastisches Elastomer, 2% Metal

Die Biocompatibilität der eingesetzten Stoffen wurde nach ISO 10993-1-Standard geprüft. Im Falle eines unerwünschten Ereignisses soll die Anwendung der Orthese sofort gestoppt werden und eine Meldung an die Firma MILLET Innovation gemacht werden. Die Firma MILLET Innovation kann bei nicht-bestimmungsgemäßer Anwendung keine Haftung tragen. Französisch ist die angewendete Bezugssprache. Ursprüngliches CE-Kennzeichen: 2021.



Nur Handwäsche



nicht bügeln weder dampfbügeln



nicht trocken-reinigen



chlorfrei



nicht maschinentrocknen



siehe Verpackung

Produkt aus der MILLET-Innovation-Forschung



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorial/Drôme - FRANKREICH

MILLET
INNOVATION

www.epitact.de

FLEXIBLE AKTIVITÄTSBANDAGE FÜR HANDGELENK UND DAUMEN **QUERV' ACTIV™**



SICHERER HALT DES DAUMENS UND BEGLEITUNG DER HANDBEWEGUNGEN

ERGONOMISCHE FORM
 > Aufsetzen leicht gemacht



SPEZIFISCHES DESIGN
 > Halt des Daumens in Ruhestellung

STÜTZENDES ELEMENT
 > intuitive Wahrnehmung der Handbewegungen

EINLAGEN AUS SILIKONGEL
 > Schutz vor Überdruck.

ANWEISUNGEN:

Die flexible Aktivitätsbandage QUERV'ACTIV™ ist für alltägliche aktive Tätigkeiten von Personen mit Sehnenscheidenentzündung De Quervain, Sehnenentzündung bzw. Erkrankung des Daumenwurzelgelenks designet worden.

GEGENANZEIGE:

Nicht auf einer Hautverletzung tragen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Handgelenkorthese ist für eine langzeitige Anwendung am Computerschreiben nicht geeignet. Nicht neben Feuer bzw. Brennstoff anwenden.

EIGENSCHAFTEN:

Die flexible Handgelenkorthese begrenzt mögliche schädliche Fehlbewegungen des Handgelenks indem der Daumen in seiner natürlichen Ruheposition gehalten wird während die komplette Beweglichkeit und Funktionsfähigkeit der Hand erhalten bleibt. Die eingesetzten bohnenförmigen Silikonteilchen schützen den Daumensattelgelenk vor Überdruckrisiken.

BEDIENBARKEIT:

Das feine technische Spezialgewebe und das spezifische morphologische Design nah der Handmorphologie unterstützen die Position des Handgelenks und garantieren einen optimalen Tragekomfort. Dank der wellenförmigen Überlappung des Gewebes am Handgelenk ist das Aufsetzen leicht gemacht. QUERV'ACTIV™ ist für den alltäglichen aktivitätsgerechten Gebrauch ohne Klettverschluss konzipiert worden, das die Kleidung beschädigen könnte.

PRODUKTLEBENSDAUER:

Dank Maschinenwäsche im mitgeliefertem Wäschenetz fungiert die Handorthese problemlos über mehrere Monate.

GEWEBEKONSTRUKTION: 83% Spezialgewebe (Polyamid, Elasthan, Polyurethan), 17% Silikon

Die Biocompatibilität der eingesetzten Stoffen wurde nach ISO 10993-1-Standard geprüft. Im Falle eines unerwünschten Ereignisses soll die Anwendung der Orthese sofort gestoppt werden und eine Meldung an die Firma MILLET Innovation gemacht werden. Die Firma MILLET Innovation kann bei nicht-bestimmungsgemässer Anwendung keine Haftung tragen. Französisch ist die angewendete Bezugssprache. Ursprüngliches CE-Kennzeichen.

 Maschinenwäsche 30 °C

 nicht bügeln weder dampfbügeln

 nicht trockenreinigen

 chlorfrei

 nicht maschinen-trocknen

 siehe Verpackung

Produkt aus der MILLET-Innovation-Forschung

 MILLET Innovation ZA Champgrand 26270 Loriol/Drôme - FRANCE


MILLET INNOVATION

www.epitact.de