

## FLEXIBLE AKTIVITÄTS-HANDGELENKBANDAGE

### CARP' ACTIV™

#### UNTERSTÜTZT UND BEGLEITET DIE BEWEGUNG



#### ANWENDUNGSGEBIETE:

Das Tragen der flexiblen Aktivitäts-Handgelenkbandage CARP'ACTIV™ wird bei Karpaltunnelsyndrom, Erkrankungen des Bewegungsapparats oder Sehnscheidenentzündungen am Handgelenk während Ihrer täglichen Aktivitäten empfohlen.

#### GENEGENANZEIGEN:

Die Bandage darf nicht direkt mit einer Hautverletzung in Berührung kommen.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN:

Nicht empfohlen bei längerem Arbeiten mit der Tastatur. Nicht in der Nähe einer Flamme oder eines glühenden Gegenstands verwenden.

#### EIGENSCHAFTEN:

Die Bandage begleitet die Bewegungen Ihres Handgelenks, wobei Sie die Finger frei bewegen können. CARP'ACTIV™ schränkt den Bewegungsumfang des Handgelenks ein und verhindert abrupte Bewegungen

#### ERGONOMIE:

Dank ihrem technischen Gewebe und ihrem speziellen Design, das sich der Wölbung der Hand anpasst, sorgt die Bandage für Sicherheit und optimalen Komfort.

#### LEBENSDAUER:

Die Bandage lässt sich in dem mitgelieferten Wäschenetz in der Maschine waschen und verfügt daher über eine lange Lebensdauer (mehrere Monate).

#### ZUSAMMENSETZUNG: 100 % Polyamid-/Elasthangelgewebe.

Die Materialien wurden allen vorgeschriebenen Tests der ISO 10993-1 Norm unterbreitet. Sollte eine Hautreaktion auftreten, sollten Sie die Anwendung sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation benachrichtigen. Millet Innovation übernimmt keine Haftung im Fall von unsachgemäßer Verwendung entgegen den Empfehlungen des Herstellers. Die massgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2018.



Maschinenwaschbar bei 30°C



Nicht bügeln.



Nicht chemisch reinigen.



Bleichen nicht erlaubt.



Nicht im Trockner trocknen.



Siehe Verpackung.

Produkt aus der MILLET Innovation Forschung.



MILLET Innovation - Z.A. Champgrand  
26270 Lorio/Drôme - FRANKREICH



MILLET  
INNOVATION

www.epitact.ch