

## FUßSOHLENKISSEN **NEW GENERATION** **COMFORTACT™ PLUS**



**PATENTIERTES MEDIZINPRODUKT  
= MEHR KOMFORT**

**FEINES,  
WEICHES TEXTIL**  
> bequem und  
Schweißdurchlässig

**EINLAGE AUS  
SILIKONGEL**  
> Verteilung der  
Druckstellen und  
Schmerzreduzierung

**PERLENOBERFLÄCHE**  
> erhöhter Laufkomfort  
für die Füße

**GEWÖLBTE FORM  
DES HALTEBANDS**  
> Komfort im  
Zehenzwischen-  
raum

**WEICHES SPEZIALGEWEBE**  
> Hohe Strapazierfähigkeit  
bei Anwendung in Schuhen

\* Die Fußsohlenkissen COMFORTACT™ PLUS sind das Ergebnis eines innovativen Forschungsprozesses und unterliegen einer wissenschaftlichen Patentierung.

**ANWEISUNGEN:** Die Fußsohlenkissen COMFORTACT™ PLUS schonen die Vorfüße durch Reduzierung der Druckstellen und schaffen Schmerzentlastung.

**GEGENANZEIGEN:** Nicht auf einer Hautverletzung tragen. An Personen mit Arteritis, Diabetes, Polyneuritis, Neuropathien der unteren Extremitäten bzw. Venensuffizienz: holen Sie die Beratung von Ihrem Arzt oder Podologen und überwachen Sie die mögliche Entstehung von Fußgebeschwerden.

**EMPFEHLUNGEN:** Wenn Ihre Fußballenschmerzen in Verbindung mit einem Hallux valgus auftreten, empfehlen wir Ihnen die Doppelschutzkissen von EPITACT®.

**EIGENSCHAFTEN:** Das ergonomisch designte Halteband paßt optimal um der natürlichen Wölbung des großen Zehs, damit keine Reizungen entstehen, und garantiert somit hohen Tragekomfort. Am Fußballen sichert ein in der Bandage eingebettete Vorfußkissen aus Silikongel EPITHELIUM™ 26 mit Perlenoberfläche den komfortablen Sitz des Vorfußes und sorgt für optimale Druckverteilung.

**BEDIENBARKEIT:** Dank dem exklusiven Design und der langlebigen Elastizität des Textilgewebes hält der Vorfußkissen optimal am Fuß. Das dünne Polster ermöglicht die Anwendung in engem Schuhwerk und mindert das Empfinden von Instabilität beim Laufen.

**PRODUKTLEBENSDAUER:** Maschinenwaschbar 30° im mitgelieferten Wäschenetz.

**GEWEBEKONSTRUKTION:** 84% Silikon, 16% Spezialgewebe Polyamid/Elasthan.

Die Biokompatibilität aller Werkstoffen wurde gemäß ISO-Norm 10993-1 getestet und bewilligt. Sollte ein unerwünschtes Ereignisses auftreten, sollten Sie die Anwendung des Produktes sofort unterbrechen und die Firma MILLET Innovation darüber benachrichtigen. Die Firma MILLET Innovation übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen. Die maßgebende Sprache ist Französisch. Ursprüngliche CE-Kennzeichnung: 2020




 Maschinentwasche 30°C.

 Nicht bügeln.

 Nicht chemisch reinigen.

 Bleichen nicht erlaubt.

 Nicht im Trockner trocknen.

 Siehe Verpackung.

Erzeugnis des Forschungsinstituts MILLET Innovation.

**MILLET  
INNOVATION**

 MILLET Innovation ZA Champgrand  
26270 Lorio/Drôme - FRANKREICH

[www.epitact.de](http://www.epitact.de)